

Scanlack Aqua Spacer Laseropaker Scanlack für detailgetreu Scans.

Verarbeitungsanleitung:



Den Stumpf mit "Pro Die Hardener" versiegeln.



Stumpf lackieren. Schichtstärke ca. 15 μ . Falls nötig 2x auftragen.



Stumpf ca. 15 min. trocknen lassen und anschließend mit Spezialisierung isolieren.



Krone mit Vollkeramik-Modellierwachs modellieren. Bitte beachten, Gips od. Spacer nicht mit heißem Instrument berühren.



Aqua-Spacer unter fließendem Wasser abwaschen. Krone auf den Stumpf aufpassen.



Fertiggestellte Krone ohne störende Farbeeinflüsse durch farbintensive Stumpflacke.